

품목인증번호	수인 07-1148 호
품목명	치과용알지네이트인상재
모델명	제조사표시사항참조
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply Sirona K.K. (일본)
사용목적	구강 내에서 치아 또는 치은의 인상에 사용하는 재료
중량 또는 포장단위	Algiace Z: 5kg (1package: 1kg x 5bags), ALZPRINT: 50kg(500g x 100boxes), 5kg(500g x 10boxes), 500g(500g x 1box)

사용방법

가. 사용 전 준비사항


1. 본 제품 사용 시 인체의 유해한 먼지로 인한 영향을 방지하기 위하여 허가된 마스크를 착용한다.
2. 본 제품 사용 전, 본 인상재료의 알지네이트 성분에 민감하여 피부염이나 발진 등을 가진 환자인지 확인할 것.
3. 파우더는 측정 전, 잘 퍼진 상태에서 주격으로 퍼올려져야 한다.
4. 자동 믹서기 사용 시 물의 온도는 20°C 이하를 사용할 것.

나. 사용방법

1. 측정

사용 전, 파우더를 개봉하고 첨부된 파우더 스푼과 측정 컵을 이용해 계량한 후, 페이스트 타입 같은 농도가 되게, 30 초에서 40 초간 혼합한다.

(측정기준)

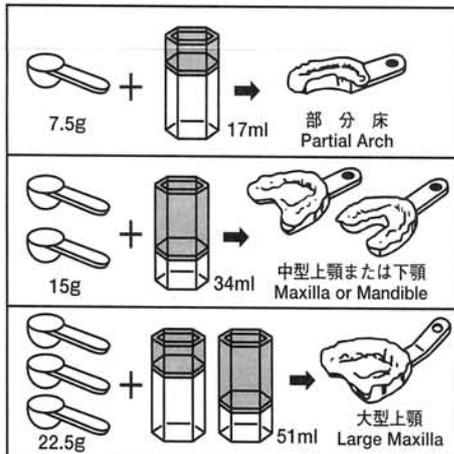

2. 인상채득

구강 안에서 유지시간만큼 인상 채득한다. Fast set 의 경우, 약 1 분-1 분 30 초간, Regular set 사용시에는 1.5-2 분간 채득한다.

3. 행굼

흐르는 물에서 인상을 행구고, 표면으로부터 수분을 제거한다.

4. 석고를 부음

습기를 제거한 뒤, 단단한 치과용 석고를 즉시 붓는다. 만약 석고를 즉시 부을 수 있는 상황이 아닐 경우, 본 제품을 습기를 유지하는 상자에 보관할 것.

다. 사용 후 보관방법

습기 흡수로부터 제품 특성의 변질을 막기 위하여 습기를 막는 air-tight container 안에 인상을 넣고 사용 즉시 포장을 봉한다.

사용 시 주의사항

가. 사용 시 주의사항

제품 취급 시 주의사항

1. 본 제품 사용 시 인체의 유해한 먼지로 인한 영향을 방지하기 위하여 허가된 마스크를 착용한다.
2. 채득된 인상은 세척이 필요하지 않지만 필요한 경우, 철저히 혈액과 침을 씻어낸다.
3. 제품 개봉 후 최대한 빨리 사용할 것.
4. 본 제품이나 혼합된 제품을 섭취하지 않도록 주의할 것.
5. 다른 제품과 혼합하여 사용하지 말 것.
6. 본 제품 설명에 명시되지 않은 용도로 사용하지 말 것.
7. 치과용으로만 사용할 것.

주요 기본 주의사항

1. 본 제품 사용 전, 본 인상재료의 알지네이트 성분에 민감하여 피부염이나 발진 등을 가진 환자인지 확인할 것.
2. 본 제품 사용 후 피부염이나 발진 등이 나타난 민감성 환자에게는 사용을 중지하고 의사에게 상담하게 할 것.
3. 사용자에게 피부염이나 발진 등이 나타난다면 직접 재료를 취급하지 말고 사용을 중지한 후 의사와 상담할 것.
4. 본 제품이나 혼합된 제품을 눈에 접촉하지 않도록 주의할 것. 눈에 인상재가 들어간 경우 물로 철저히 헹구고 안과에 상담하도록 한다.

나. 유효기간

제조일로부터 3년

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1. 실온에서 제품 형태대로 사용 후 반드시 포장을 밀봉하여 보관한다.
2. 고온과 습한 곳을 피하여 보관하고 수분을 흡수하지 않도록 주의한다.
3. 치과용 전문 취급자 이외의 사람이 본 제품을 취급하지 않도록 적절히 보관되어야 한다.

첨부분서의 작성 및 개정연월	2021.05
보관 또는 저장방법	실온에서 밀봉하여 통풍이 잘 되는 곳에서 차광 보관한다.
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT 번호 참조
제조연월	제조사 표시사항 참조

본 제품은 의료기기임