

품목인증번호	수인 98-598 호
품목명	부가중합형폴리비닐실리콘인상재
모델명	Aquasil Soft Putty
수입업자	덴츠플라이시로나코리아(유), 서울특별시 송파구 법원로 135, 7층(문정동)
제조원(제조국)	Dentsply DeTrey GmbH (독일)
사용목적	구강 내 인상 채득용 크라운, 브릿지 부분 및 무 치악 인상 채득용
중량또는포장단위	Base Paste : 450ml, Catalyst Paste : 450ml
사용방법 가. 사용 전 준비사항 - 인상 채득 부위를 깨끗이 소제한다. 나. 사용방법 - 혼합: 동량의 베이스와 카탈리스트를 단색이 될 때까지 혼합한다. - 트레이장착: 혼합물이 혼합 시작 후 1분 30초 내에 트레이에 투여한다. - 인상채득: 트레이를 구강 내에 삽입한후 인상을 채득한다. 다. 사용 후 보관 및 관리방법 - 인상 채득분을 차가운 물로 씻어준 다음 에어로 건조시킨다. - 채득한 인상은 직사광선을 피하도록 한다. 사용 후 밀봉한다.	
사용 시 주의사항 가. 사용 시 주의사항 - 치과용으로 사용할 것. - 인화물질과는 멀리할 것. - 눈에 접촉하지 않도록 할 것. - 알루미늄 염산에 기초한 수렴제와는 함께 사용하지 말 것. 나. 사용금지 - 임시 리라이닝용으로 사용금지. - 폴리에테르 또는 폴리설파이드 재료와는 함께 사용하지 말 것.	
첨부분서의 작성 및 개정 연월	2021.05
보관 또는 저장방법	사용 후 밀봉하여 섭씨 18°C~25°C에서보관
유효기간	제조일로부터 3년
제조번호	LOT번호 참조
제조연월, 사용기한	제조자 표시사항 참조
본 제품은 의료기기임	