

**【품목명】**치과용임플란트시술기구 (C21010,01, 1등급)

**【모델명】**제품 라벨 참조

**【품목신고번호】**서울 수신 04-770호

**【사용목적】**치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

**【사용방법】**

1. TempBase Cap을 소독한다.
2. 인상 뜸 때 적합한 TempBase Cap을 결정한다.
3. 인상 할 위치를 설정한 후 TempBase Cap의손잡이부분을 가볍게 쥐고 인상뜸 부위에 TempBase Cap을 정확하게 위치시킨다.
4. TempBase Cap이 인상할 부위에 정확히 위치된 것이 확인되었으면 채택된 TempBase Cap을 유효 적절하게 사용하여 인상을 시작한다.

**【사용 후 보관 및 관리방법】**

1. 사용된 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

**【사용시 주의사항】**

1. 수술 30분 전에는 반드시 소독을 실시하여야 한다.
2. 수술 부위에 손상이 가지 않도록 TempBase Cap을 다룰 때에는 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
3. 사용 후에는 깨끗이 세척을 하여 항상 청결한 상태가 유지되도록 해야 하며, 직사광선을 피하여 습기가 없는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

**【보관 또는 저장방법】**상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다.

**【중량 또는 포장 단위】**1개

**【제조번호/제조연월】**제품 라벨 참조

**【수입판매원】**(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

**【제조원】**Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany